




Cationorm®



Krople do oczu, emulsja

 **Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej ulotki.**
Należy zachować niniejszą ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie dalszych pytań.
W przypadku utrzymujących się objawów należy skonsultować się z lekarzem.

1. Co to jest Cationorm® i w jakim celu się go stosuje

Cationorm® to sterylne, hipotoniczne krople do oczu w postaci emulsji przypominającej mleczną ciecz. Nie zawiera środków konserwujących. Można stosować razem z soczewkami kontaktowymi.

Preparat Cationorm® zawiera: oleje mineralne, glicerol, tyloksapol, poloksamer 188, tris-hydrochlorek, trometaminę, chlorek cetalkonium (jako związek kationowy) oraz wodę oczyszczoną.

Każda buteleczka Cationorm® zawiera 10 ml jałowej emulsji.

Krople Cationorm® są przeznaczone do łagodzenia objawów suchego oka, takich jak kłucie, świąd, pieczenie lub też uczucie obecności ciała obcego (piasku lub kurzu) w oczach. Objawy te mogą być spowodowane czynnikami zewnętrznymi, np. klimatyzacją, zanieczyszczeniem, podróżą samolotem, pracą przed ekranem komputera, operacją refrakcji, noszeniem soczewek kontaktowych itp., lub stanami patologicznymi, takimi jak dysfunkcja gruczołu tarczowego. Krople Cationorm® nawilżają, powlekać oraz chronią powierzchnię oka.

2. Przed użyciem Cationorm®

Nie stosować Cationorm® w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik preparatu.

Nie wolno stosować preparatu w celu leczenia innych dolegliwości oczu. W razie jakichkolwiek pytań należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli aktualnie stosujesz inne krople, odczekaj przynajmniej pięć minut przed użyciem Cationorm®.

Zaleca się, aby Cationorm® był stosowany jako ostatni preparat.

Preparat Cationorm® może być stosowany podczas noszenia wszystkich rodzajów soczewek kontaktowych.

3. Jak stosować preparat Cationorm®


PODANIE DO OKA.

Zalecany schemat dawkowania to 1 kropla do każdego oka, 1 do 4 razy dziennie.

Instrukcja użycia:




- Umyć ręce.
- Przy pierwszym użyciu buteleczki z kroplami, zdjąć pierścien zabezpieczający z zakrętki pociągając za końcówkę.

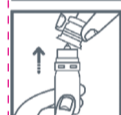

- Otworzyć buteleczkę delikatnie pociągając zakrętkę.
- Chwycić buteleczkę między kciuk i palec wskazujący.
- Nie dotykać palcami końcówki buteleczki.
- Odchylić głowę do tyłu.



- Delikatnie odciągnąć dolną powiekę i spojrzeć do góry.
- Przytrzymać buteleczkę nad okiem i umieścić tylną część dłoni na czole. Delikatnie wycisnąć jedną kroplę do oka i zamrużyć kilka razy.

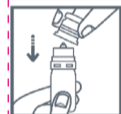

- Nie dotykać oka ani rzęs końcówką buteleczki.
- Po każdorazowym użyciu zamknąć buteleczkę nakrętką.
- Nieużywaną buteleczkę z kroplami przechowywać w pudełku.

Nie stosować kropli Cationorm® po upływie trzech miesięcy od pierwszego otwarcia, gdyż grozi to zakażeniem.

4. Jakie są możliwe skutki uboczne?

W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić przejściowe dolegliwości, takie jak: podrażnienie oka, ból oka, uczucie ciała obcego w oku, zaczerwienienie oka, swędzenie oka, łzawienie oczu, uczucie pieczenia w oku, tymczasowe zaburzenia widzenia, zapalenie powiek lub obrzęk powiek. Objawy te są również typowe dla zespołu suchego oka powiązanego z występowaniem innych schorzeń objawiających się suchością oczu.

W PRZYPADKU ODNOTOWANIA JAKICHKOLWIEK SKUTKÓW UBOCZNYCH NIE WYMIENIONYCH W TEJ ULOTCE NALEŻY O TYM POINFORMOWAĆ LEKARZA LUB FARMACEUTĘ.

5. Jak przechowywać krople Cationorm®

Buteleczkę przechowywać w pudełku w temperaturze pokojowej.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie używać jeśli buteleczka jest uszkodzona.

Nie używać po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.

Produkt należy zużyć w ciągu 3 miesięcy od pierwszego otwarcia.


Zapisać datę pierwszego otwarcia buteleczki poniżej: _____

Niniejszą ulotkę zaktualizowano po raz ostatni w marcu 2019 r.

 **Producent:**
Santen
1, rue Pierre Fontaine
Bâtiment Genavenir IV
91000 Evry
Francja

 **0459**

STERILE | A

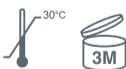

Dystrybucja:
Santen Oy
Kelloportinkatu 1
(Tampella building)
33100 Tampere
Finlandia

Symbol				STERILE A	LOT			
Znaczenie	Producent	Przechowywać w temperaturze poniżej 30 °C	Produkt należy zużyć w ciągu 3 miesięcy od pierwszego otwarcia.	Wysterylizowano metodami aseptycznymi	Numer serii	Data ważności	Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.	Nie używać w przypadku uszkodzenia opakowania.

NOT20319V03



MARVACO OY
PELTOTIE 20,
FIN-28400 **ULVILA**, FINLAND
repro@marvaco.fi
marvaco.fi • **marvaco.se**

08.01.2020

Proof No. 5

Santen

Part No: 1647-02

Leaflet Cationorm

Item No: NOT20319V03

Dimensions:
150 x 480 mm
Weight: 40 g/m²
Fonts/Size
Aller 9-14 pt

Country: PL

Pharmacode:
340

Colors:



PANTONE
431 C



Die cut

PLEASE, CHECK THE SPOT COLORS FROM PANTONE® COLOR GUIDE.